

# Preg


## TEST DE EMBARAZO

Preg es un test de embarazo para el autodiagnóstico. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el test de embarazo Preg. No abra el envoltorio de aluminio hasta que usted esté preparada para usar el test. Tenga un reloj a la vista para controlar el tiempo de realización de la prueba.



### CÓMO USAR EL TEST

Preg es un test de embarazo que puede realizarse a partir del primer día de retraso y con la orina de cualquier hora del día. Saque el test de embarazo del envoltorio de aluminio y retire el capuchón.

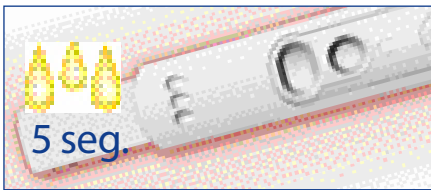

Moje el absorbente directamente mientras orina, manteniéndolo bajo la orina, por lo menos, durante 5 segundos. A continuación, mantenga el test hacia abajo sin voltearlo.



Introduzca el stick en el capuchón. Coloque el stick en una superficie plana con las ventanas mirando hacia usted y espere 5 minutos antes de leer el resultado.

### LECTURA DEL RESULTADO

Una vez completado el test, una línea rosa/púrpura aparecerá en la ventana de control. Ello indica que la prueba está funcionando correctamente.

Lea el resultado al cabo de 5 minutos de haber realizado el test. No interprete el resultado pasados 30 minutos desde la realización del test.



**SÍ**  
Embarazada

Puede concluir que está embarazada, si pasados 5 minutos aparece una línea rosa/púrpura en la ventana de lectura (T). Incluso en el caso de que el color de la línea sea pálido, significa que está embarazada. En algunos casos puede observarse un resultado positivo en menos de 1 minuto de funcionamiento del test.



**NO**  
No embarazada

Puede concluir que no está embarazada, si pasados 5 minutos no aparece una línea rosa/púrpura en la ventana de lectura (T).



**Importante:** Siempre debe aparecer una línea visible en la ventana de control. En caso de que la línea de control no aparezca, significa que el test no ha funcionado correctamente y que el resultado no es válido. Esto puede ser debido a una falta de orina en el absorbente. Repita la prueba con un nuevo test de embarazo Predictor, siguiendo detenidamente las instrucciones de uso.

## EN CASO DE RESULTADO POSITIVO, GUARDE EL TEST.

El resultado positivo permanece invariable de forma indefinida, por lo que puede guardar el test si así lo desea. De este modo, puede romper la agarradera con un simple clic, haciendo el stick más compacto y cómodo para guardar o incluir en el álbum de fotos de su bebé.



## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

### ¿Qué precisión tiene el test de embarazo Preg?

Preg ha demostrado clínicamente una precisión del 99%, siendo equiparable a un test clínico.

### ¿Cómo funciona el test de embarazo Preg?

Cuando una mujer se queda embarazada su cuerpo empieza a producir una hormona conocida como hCG (Gonadotropina Coriónica Humana), que está presente en su orina en cantidades que se van incrementando diariamente. Preg ha sido específicamente diseñado para detectar dicha hormona en cantidades muy pequeñas. La prueba puede realizarse a partir del primer día de retraso de la menstruación.

### ¿A partir de qué día puedo utilizar Preg?

Preg detecta hCG en su orina con un 99% de precisión a partir del primer día de la falta de la menstruación. Si tiene un ciclo irregular, tome como referencia el ciclo más largo y añádale un día.

No es recomendable realizar el test antes de la primera falta de la menstruación dado que la fiabilidad del test quedará por debajo del 99%. Si realiza el test antes, puede darse el caso de que usted esté embarazada pero que su cuerpo no haya producido suficiente hCG como para ser detectada por el test. Por otro lado, un positivo precoz (por ejemplo: diagnosticado antes de la primera falta de la menstruación) tampoco es fiable, ya que en algunos casos puede producirse un final natural con la llegada de la menstruación.

### ¿Debo hacer el test con la primera orina del día?

No. Puede hacer el test de embarazo Preg en cualquier momento del día. No es necesario utilizar la primera orina del día.

### ¿Qué debo hacer si tras 5 minutos no ha aparecido ninguna línea en la ventana de resultado, pero sí unos minutos más tarde?

Si la línea aparece en la ventana de resultado dentro de los 30 minutos siguientes a la realización del test, el resultado es positivo, incluso si el color de la línea es pálido.

### ¿Cuánto tiempo se mantiene estable el resultado en el test?

En caso de obtener un resultado positivo, éste permanecerá invariable indefinidamente aunque el fondo pueda oscurecerse ligeramente. Puede guardar el test con el resultado positivo si así lo desea.

En caso de obtener un resultado negativo, a los 30 minutos de

¿Todavía no está embarazada pero desea estarlo? El test de ovulación Preg le indica cuáles son los dos días más fértiles de su ciclo menstrual.

haber realizado el test puede aparecer una línea muy pálida en la ventana de resultado. Esta línea rosa/púrpura pálido que aparece a los 30 minutos, no indica un resultado positivo. Recuerde: no interprete el resultado del test pasados 30 minutos desde su realización.

### ¿Puedo realizar el test con la orina recolectada en un vaso?

Sí, siempre y cuando el vaso en el que recolecte la orina esté limpio y seco. No utilice detergentes o disolventes para limpiarlo. Utilícelo directamente sumergiendo el absorbente en la orina al menos durante 10 segundos. Vigile que el nivel de orina no sobrepase el absorbente. Espere 5 minutos hasta leer el resultado.

### ¿Qué debo hacer si el resultado del test es positivo?

Si el resultado del test es positivo, debe consultar con su ginecólogo.

El diagnóstico precoz del embarazo es importante para asegurar su salud y la de su bebé.

### ¿Qué debo hacer si el resultado del test es negativo y aún tengo dudas?

Si el resultado es negativo, significa que el test no ha detectado hormona del embarazo en la orina (Gonadotropina Coriónica Humana). Ello puede ser debido a un error en el cálculo del día de la primera falta de la menstruación. Si la menstruación no le viene en esa semana, repita la prueba usando un nuevo test de embarazo Predictor. En el caso de que el resultado volviera a ser negativo y todavía no tuviera la menstruación, consulte a su ginecólogo.

### ¿Puede afectar el resultado la toma de algún medicamento?

El resultado sólo puede verse afectado por la toma de medicamentos para la fertilidad que contengan hCG (Gonadotropina Coriónica Humana) o hMG (Gonadotropina Menopáusica Humana). Otros medicamentos para la fertilidad, antibióticos, analgésicos o la píldora anticonceptiva, no afectan el resultado.

### ¿Puedo utilizar el test de embarazo Preg más de una vez?

No, el test de embarazo únicamente se puede utilizar una vez.

## Para más información

Si desea más información contacte con:

ACO HUD NORDIC AB

E-mail: [info@aconordic.com](mailto:info@aconordic.com)

Tel.: +46(8) 59 00 29 00 (en horas de oficina)

Por favor, indique el número de lote impreso en el estuche.

[www.aconordic.com](http://www.aconordic.com)

Composición: Test de embarazo en stick que contiene una membrana recubierta con anticuerpos monoclonales y policlonales, y una fibra que contiene tintura monoclonal IgG (anticuerpos) conjugada en una matriz de proteínas.

Guardar a temperatura ambiente (15°C - 28°C) cerrado dentro del envoltorio. No utilice el test si el envoltorio de aluminio está dañado.

Mantenga el test alejado del alcance y de la vista de los niños.

**LOT** Número de lote.



Usar preferentemente antes de la fecha indicada en el estuche.

**IDV** IDV Dispositivo Médico de Diagnóstico in-Vitro.

Test de un solo uso.

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el test.

Fabricante: Omega Teknika - Farnham Drive - Finglas - Dublin 11 - Ireland

Distribuidor: ACO HUD NORDIC AB, SE - UPPLANDS VÄSBY, NO - OSLO, DK - HORSHOLM, FI - ESBOO

Fecha última revisión 2006/10