


Preg

GEBELİK TESTİ

Preg gebelik testi kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir testtir. Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Testi yapmaya hazır olmadan alüminyum folyo ambalajı açmayınız. Yanınızda bir saat bulundurunuz.

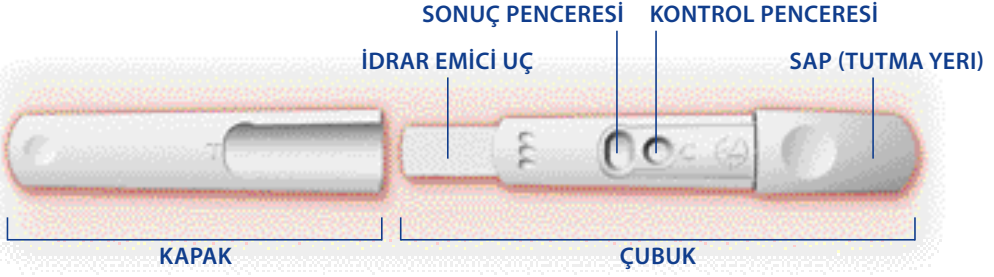


TESTİ NASIL YAPACAKSINIZ

Preg adetinizin geciktiği ilk günden itibaren günün herhangi bir saatinde kullanılabilir. Gebelik testini alüminyum folyo ambalajından çıkartın. Kapağı çubuğun üzerinden çıkararak testi açın.



Emici ucu idrar akınıza 5 saniye boyunca tamamen ıslanana kadar tutun. Çubuğu ters çevirmeden aşağıya doğru tutmaya devam edin.

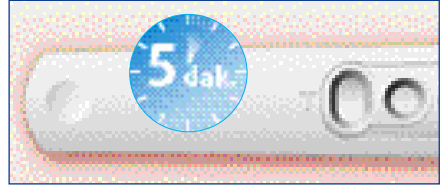

Kapağı çubuğa takın. Testi, okuma pencerelerini görebileceğiniz şekilde düz bir zemine koyun ve 5 dakika sonra sonucu okuyun.

SONUCUN OKUNMASI

Testi tamamladıktan sonra hamile olsanız da olmasanız da yuvarlak kontrol penceresinde pembe/mor bir çizgi oluşacaktır. Bu testin doğru çalıştığını gösterir.

Testi tamamladıktan 5 dakika sonra sonucu okuyunuz. 30 dakikadan fazla beklemiş testi değerlendirmeye almayın.



EVET
Hamilesiniz

Büyük oval sonuç penceresinde (T) pembe/mor çizgi oluştuysa hamilesiniz. Çizgi çok açık-soluk renkte olsa bile bu durum hamile olduğunuz anlamına gelir. Hatta bazı durumlarda daha birinci dakikada bile pozitif sonuç görülebilir.



HAYIR
Hamile değilsiniz

Büyük oval sonuç penceresinde (T) çizgi oluşmadıysa hamile değilsiniz.



Önemli: Kontrol penceresinde mutlaka çizgi oluşmalıdır. Oluşmaz ise, bu testin doğru çalışmadığı anlamına gelir ve sonuç geçersizdir. Bunun sebebi emici çubuğa yeterli miktarda idrarin temas etmemiş olması olabilir. Test tekrar edilmelidir.

SONUÇ POZİTİF VE SAKLAMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Pozitif test sonucu zaman içerisinde değişmez. Dilerseniz pozitif test sonucunuzu saklayabilirsiniz. Bunu daha pratik hale getirmek için Preg'ün tasarımı yenilendi: Sonucun okunduğu kısmı kırıp saptan ayırabilirsiniz. Böylece rahatlıkla saklayabilir veya bebeğinizin ilk albümüne koyabilirsiniz!



PREG GEBELİK TESTİ HAKKINDA SIKLIKLA SORULAN SORULAR

Preg ne kadar kesin sonuç verir?

Preg ün, doktor tarafından yapılan gebelik testi kadar, %99'un üzerinde kesin sonuç verdiği klinik olarak kanıtlanmıştır.

Preg nasıl çalışıyor?

Bir kadın hamile kaldığında vücudu hCG (insan koryonik gonadotropin) olarak bilinen bir hormon üretmeye başlar ve bu hormon gittikçe artan miktarlarda idrarda bulunur. Preg, bu hamilelik hormonunu çok küçük miktarda bile idrarınızda tespit edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Adetinizin geciktiği ilk günden itibaren testi uygulayabilirsiniz.

Preg ü ne kadar erken dönemde kullanabilirim?

Preg %99 doğru olarak, adet gecikmesinin ilk gününden itibaren idrarda hCG varlığını tespit eder. Eğer düzensiz adet görüyorsanız, testi çok erken yapmamış olmak için en uzun adet döneminizi olarak üzerine bir gün ekleyin. Testi adet gecikmenizden önce de yapmanız mümkündür ancak tavsiye edilmemektedir çünkü bu durumda güvenilirliği %99'un altında kalır. Testi erken yaparsanız, hamile olduğunuz halde henüz tespit edilebilecek miktarda hCG üretmemiş olabilirsiniz. Diğer tarafta erken yapılmış ve pozitif sonuç veren bir test de yanıltıcı olabilir, çünkü erken (adet gecikmenizden önceki) dönemde tespit edilen gebelikler doğal yoldan sonlanabilir.

Testi sabah mı uygulamalıyım?

Hayır. Preg'ü günün herhangi bir saatinde uygulayabilirsiniz. Testi yapmadan hemen önce fazla miktarda sıvı almanız hamilelik hormonunu seyreltebilir. Bu nedenle kullanmadan önce normal miktarda sıvı alın.

5 dakikanın sonunda sonuç penceresinde çizgi belirmedi, ancak daha sonra belirdi.

Sonuç penceresinde 30 dakikalık zaman zarfında çizgi belirirse, açık-soluk renkte bile olsa, sonuç pozitifdir.

Test sonucum uçup gitmeden veya değişmeden ne kadar süre kalır?

Pozitif sonuç değişmeden kalır, ancak fon rengi koyulaşabilir. Dilerseniz pozitif sonucu saklayabilirsiniz. Ancak sonuç negatif ise 30 dakikadan sonra sonuç penceresinde çok açık renkte bir çizgi oluşabilir. 30 dakikadan sonra ortaya çıkan bu renk sonucun pozitif olduğu anlamına gelmez. Unutmayın: 30 dakikadan fazla beklemiş test değerlendirmeye alınmamalıdır.

Testi bir kaba idrar yaparak kullanabilir miyim?

Evet, idrar örneğini temiz ve kuru bir kaba aldığınız sürece bu da mümkündür. Kabi temizlemek için deterjan veya çözücü kullanmayınız. İdrarı bekletmeden testi uygulayın: emici ucu kaptaki idrarın içinde en az 10 saniye bekletin. İdrar seviyesinin çubuğun plastik kısmına taşmamasına dikkat edin. Beş dakika bekleyip okuyun.

Test sonucunu pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?

Eğer test sonucu pozitif çıkarsa doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Doğum öncesi erken bakım hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından büyük önem taşır.

Test sonucu hamile olmadığımı gösteriyor ama ben bundan emin değilim

Test sonucu hamile olmadığınızı gösteriyorsa idrarınızda hamilelik hormonu (hCG) tespit edilmemiştir. Adet tarihinizi yanlış hesaplamış olabilirsiniz. Bir hafta içerisinde adet görmezseniz yeni bir Preg ile testi tekrarlayın. Sonuç hala negatif ise ve hala adet görmediyseniz doktora gitmenizi tavsiye ederiz.

Kullandığım ilaçlar test sonucunu etkiler mi?

Preg sadece hCG (insan koryonik gonadotropin) veya hMG (insan menoposal gonadotropin) içeren fertilité ilaçlarından (kısırlık tedavisinde kullanılan ilaçlardan) etkilenir. Diğer kısırlık tedavisi ilaçları (örneğin Clomifene), antibiyotikler, ağrı kesiciler veya gebeliği önleyici haplar sonucu etkilemez.

Preg testini birden fazla kullanabilir miyim?

Hayır, testi sadece bir kere kullanabilirsiniz.

Henüz hamile değilsiniz ama kalmak mı istiyorsunuz? Preg Ovülasyon Testi adet dönemleri arasında hamile kalma olasılığınızın en yüksek olduğu iki günü belirleyecektir.

Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz bize yazın:

e-mail: info@aconordic.com

Telefon: + 46(8) 59 00 29 00

www.aconordic.com

Bileşimi: Monoklonal ve poliklonal antikorlar içeren bir membran ile kaplı ve tamponunda protein matriksi içinde fare monoklonal IgG (antikor) boya bileşiği bulunan test çubuğu.

15-28°C arasındaki oda sıcaklığında kapalı ambalajında saklanmalıdır.

Alüminyum folyo ambalajı zedelenmiş ise testi kullanmayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

LOT Seri numarası.



Kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız.

IVD In-Vitro Diagnostik Tıbbi Cihaz.

2 Tek kullanımlıktır.

1 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Üretici Firma: Omega Teknika, Farnham Drive, Finglas, Dublin11, İrlanda

İthalat ve Dağıtım: ACO HUD NORDIC AB,SE - Upplands Väsby, NO - Oslo, DK - Horsholm, FI - Esbo

Revizyon tarihi 2008-05 (2007/1)